

SURFA'SAFE_{Q2}

Mousse Détergente Désinfectante pour surfaces et matériels médicaux



- Nettoie et désinfecte.
- Tous les composants organiques sont facilement biodégradables
- Ethanol d'origine agricole.
- Large spectre antimicrobien.
- Pouvoir oxydant en pH faiblement acide.
- Dispenseur de mousse compacte limite la formation d'aérosols et la volatilité des composants.
- Utilisation possible sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Bonne compatibilité avec les matériaux.



PRÊT À L'EMPLOI



INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des matériels médicaux et surfaces en blocs opératoires, services à hauts risques, services de soins...

CARACTERISTIQUES

- Produit prêt à l'emploi.
- Solution limpide incolore.
- pH à +20°C : ≈ 5
- Pourcentage d'éthanol : 45% v/v.
- Point d'éclair : +26,5°C ± 0,5°C.

SURFA'SAFE₂

Mousse Détergente Désinfectante pour surfaces et matériels médicaux

MODE D'EMPLOI

Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.




1

Appliquer la mousse détergente désinfectante sur un non tissé propre et sec.



2

Bien répartir le produit sur la surface à traiter. Laisser agir.

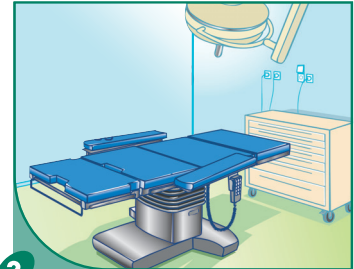

3

Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles à l'éthanol et aux composés oxydants.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

COMPOSITION

> 30% : eau, Désinfectants : Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 372 mg/g),
< 5% : agents de surface amphotère et anionique, désinfectant : Peroxyde d'hydrogène (N°CAS 7722-84-1 : 5.8 mg/g),
100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle,
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. **Stocker en position verticale entre +5°C et +25°C.** Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels.



PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

SURFA'SAFE O2 est conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne (tests de suspension et tests de surfaces)

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 13697	1 minute
	BMR selon EN 13697	1 minute
Mycobactéries	EN 14348 (Mycobacterium terrae)	5 minutes
Levures	EN 13697	1 minute
Moisissures	EN 13697	5 minutes
Virus	Selon EN 14476+A1 : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus	1 minute
	Selon EN 14476+A1 sur Rotavirus	5 minutes

CONDITIONNEMENT

12 flacons de 750ml Réf. 2178544



Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com